



**Home** az eszköz működési központja, amely a felhasználói felületet biztosítja a kezelés lebonyolítására. A képernyőn láthatóak és állíthatóak a kezelés paramétere, a beteg impedanciája, illetve legfeljebb 7 fiziológiai megfigyelési paraméter



Az **Options** menüben tudjuk módosítani az eszköz alapértékeit, személyre szabhatjuk a felhasználói felület kezelését, és jegyzőkönyvet nyomtathatunk.



**Parameters** elérhetővé teszi az összes paraméter beállítást, illetve lehetővé teszi hogy 4 különböző paraméter tartományt válasszunk (1 vagy 4 gombos Mód) a kezelés optimalizálására



**LCD** menüben legfeljebb 7 folyamatosan megfigyelhető fiziológiai paraméter választható, melyek itt is és a Home felületen is követhetőek. A paraméter konfiguráció tartalmaz 2-6 EEG-t, 1 EKG-t, 1 EMG-t, illetve az Optical Motion Sensor (OMS)-t.



A **Chart** menüben legfeljebb 4 fiziológiai paraméter választható nyomtatásra. Ezen a képernyőn lehet a Chart Recorder-t be illetve ki kapcsolni.



**Lead Impedance** aktiválja az impedancia tesztjét az összes elvezetésnek, folyamatosan frissíti az értékeket a képernyőn. A beteg vezetőképességének biztosítására szokták használni az összes elvezetésen, az adat vesztés elkerülésére.



**Replay Manager** megtartja az összes adatot az utolsó sikeres vagy problémás stimulációról, így az adat megmarad, illetve újranyomtathatóvá válik.



**Date & Time** menüben állítható be a dátum és az idő. A dátumnál több formátum is választható.



**Info** menüben találhatóak az alapinformációk a MECTA Sigma-ról illetve, hogy hogyan lehet felvenni a MECTA-val a kapcsolatot.